

Art.-Nr.	Inhalt
550001	1 x botiss grafter



botiss biomaterials GmbH
Hauptstr. 28
15806 Zossen / Germany

Tel: +49 33769 / 88 41 985
Fax: +49 33769 / 88 41 986

www.botiss.com
#botissdental




biotrics bioimplants AG, Ullsteinstr. 108, 12109 Berlin, Deutschland
www.biotrics.com

Rev.: BBGde-02/2025-01

botiss grafter

APPLIKATOR FÜR JEDES KNOCHENERSATZMATERIAL

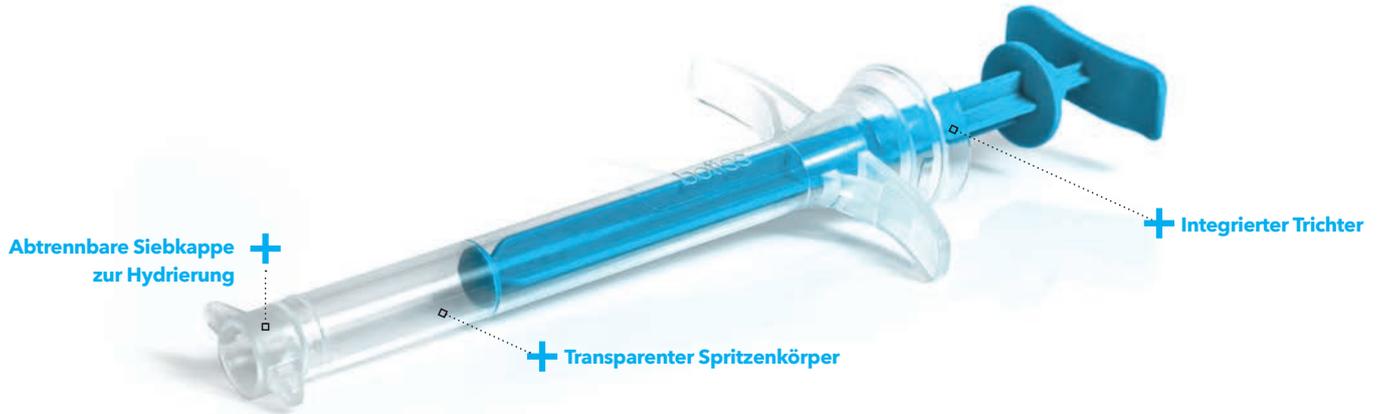

SYSTEM THINKING:

ERMÖGLICHT DIE VERWENDUNG MIT VERSCHIEDENEN MATERIALIEN

mit und ohne Hyaluronsäure oder deren Mischungen

botiss grafter

Optimale Hydrierung im Applikator mittels Siebkappe

Effizientes Einbringen der gewünschten Menge
an Knochenersatzmaterialien

Applikation von bis zu 2 ml partikulären
Knochenersatzmaterialien

Komfortable und saubere Handhabung

KOMPAKTES **INTUITIVES DESIGN**



Steril geliefert

Für den **einmaligen** Gebrauch konzipiert

Ideal für jedes botiss-Knochenersatzmaterial mit und ohne Hyaluronsäure

Erlaubt das **Mischen von Materialien**




workflow




1. SCHÜTTELN
des Fläschchens oder
Blisters vor der Anwendung



2. EINFÜLLEN
über integrierten Trichter

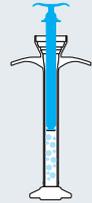


3. EINBRINGEN
der Kolbenstange

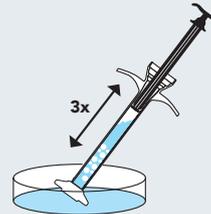

4. HYDRIEREN
des Knochenersatzmaterials



5. PAUSIEREN
für ca. 30 Sekunden

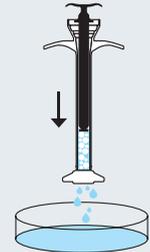

6. HERAUSDRÜCKEN
überschüssiger Flüssigkeit



7. ENTFERNEN der
SIEBKAPPE



8. APLIKATION
des Knochenersatzmaterials